

## 【ご使用前】

- 1) 本製品は未滅菌製品です  
使用前に十分な洗浄を行い、適切な方法で滅菌してから使用してください
- 2) 本製品に傷などが無いことをご確認ください



## 【ご使用に際して】

- 1) 平坦な面が内側を向くように JAWチップを 器具の先端に挿入してください  
挿入の際は、異物などの噛み込み等が無いが、良く確認してください  
器具の先端が JAWチップ内腔の壁に当たり、止まるまで押し込んでください
- 2) 挿入後は、緩みやガタツキが無いが、目視及び用手的に確認してください
- 3) 必要に応じ、JAWチップの穴に縫合糸などを通して脱落を予防してください
- 4) 自動縫合器にご使用の際の注意事項



&lt;しっかり押し込んでください&gt;

&lt;連続してご使用になる場合&gt;

装着の緩みが発生する可能性があるため、

**毎ファイヤごとにチップの装着確認（押し込む）をしてください**

&lt;補強材をご使用される場合&gt;

**JAWチップを先端から外した状態で補強材を装着し、再挿入してください**

再挿入の際は、補強材など異物の噛み込み等が無いが、良く確認してください

&lt;トロカールを経由して体腔に挿入される場合&gt;

**縫合器を最後まで閉じた状態で、挿入及び抜去を行ってください****トロカールの先端に引っかからないよう、真っすぐな状態で抜去してください**

&lt;ガイドチューブ類との併用は想定しておりません&gt;

**ご使用になる場合は、チューブを抜去後、JAWチップが正しく装着されているか再度ご確認ください**

- 5) JAWチップは、3症例での使用を目途に交換してください  
手術中に抜差し頂く事は可能ですが、嵌合が緩く感じた場合は、他のJAWチップと交換してください
- 6) 万が一、床に落下させてしまった場合は、未使用の場合でも、滅菌済みの場合は症例数にカウントしてください

## 【ご使用后】

- 1) 体液などをふき取り、JAWチップを、装着した器具から用手的に引き抜いてください  
チップの先端を横から掴むようにし、揺らして頂くと比較的抜けやすくなります
- 2) 抜けにくい場合は、ガーゼ等で保護し、ペアン等を先端の穴に引掛けて引き抜いてください
- 3) **使用後は、本製品が体内に残存していない事を必ず確認してください**
- 4) JAWチップは、取り外したのち出来るだけ早く洗浄し、  
血液等の異物の付着が無い状態にしてください
- 5) 洗浄後は、直ぐに乾燥させ、清潔な場所で保管してください



着脱方法の説明動画は、こちらをご覧ください→



## 【滅菌の運用に関する事項】

- 1) 本品は、滅菌、抜差しにより若干の形状変化が起こるため、3症例でのご使用后、廃棄してください
- 2) 滅菌の際は、キズ等の発生防止のため、1袋に1個での運用をお願い致します
- 3) <症例数カウントの運用例>  
滅菌袋等に、限度回数を記載頂き、  
1回目滅菌：表示「3/3」→ 使用 → 2回目：表示「2/3」→ 使用 →  
→ 3回目：表示「1/3」→ 使用 → 廃棄      のような形で回数管理をお願い致します

(ご参考)

